

Reinigungs- und Pflegehinweise für die KUBIVENT ConformLight Matratze

Komplettreinigung	Spezialreinigung durch KUBIVENT	ja
	Waschen in der Waschmaschine u. Trocknen im Trockner (bei max. 60 °C)	nein
	Reinigung mit den im medizinischen Bereich üblichen Methoden (bis 60 °C)	ja
Bezug Baumwolle (bzw. Unterbezug)	Desinfektion und Sterilisation per Autoklav, KEINE Verwendung von Äthylenoxid, Formaldehyd, Phenolen	ja
	waschbar bei	60 °C
Inkontinenz-Schutzbezug	trocknergeeignet	nein
	kochfest (95 °C), desinfizierbar, sterilisierbar	ja
	trocknergeeignet	ja

Reinigung der ConformLight-Matratze durch KUBIVENT

Um die 3-Jahres-Garantie nicht zu gefährden, darf die gesamte Matratze nur vom Hersteller komplettgereinigt werden. Reinigungen, die nicht vom Werk durchgeführt werden, machen die Garantie ungültig!

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 3-jährige Garantie gilt

nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift

Neben der Matratze ist eine ganz wesentliche pflegerische Maßnahme wichtig: Das richtige Positionieren des Patienten.

Wer länger liegt, muss richtig liegen, immer wieder umgelagert sowie beim Sitzen und Essen stabilisiert werden.

Mit KUBIVENT PurplePos haben wir dafür ein ganz spezielles, völlig neues Programm entwickelt.

Es ist auch für pflegende Angehörige eine leicht zu handhabende Hilfe:

Denn nur zwei Kissen-Formen schaffen das, wozu bisher eine Vielzahl davon nötig war.

Lassen Sie sich dazu von Ihrem Sanitätsfachhändler, der Ihnen die Matratze geliefert hat, genauer informieren. Er wird Ihnen darüber hinaus auch gerne Tipps geben, wie Sie mit der für Sie ungewohnten Situation eines zu pflegenden Angehörigen besser fertig werden.



45°-Positionierung



A-Positionierung, liegend




Individuell modellierbar bei hoher Formstabilität

Änderungen vorbehalten · Stand 01/2018

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT ConformLight

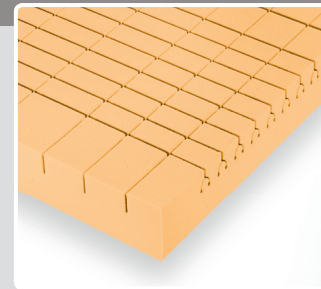

Prophylaxe + Therapie

Braden allgemein - hoch




Indikationen und Einsatzbereiche

Der Einsatz der Matratze unterstützt bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Prophylaxe und Therapie

- ◇ bei bereits bestehenden Decubiti (bis zum Decubitus-Stadium II).
- ◇ bei Personen mit allgemeinem bis hohem Decubitus-Risiko (nach Braden), bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Patienten

- ◇ bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Decubitus-Prophylaxe bzw. Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt.
- ◇ als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Decubitus.
- ◇ die speziell gelagert werden (Kopfhoch-/Fußtiefenlagerung). Aufgrund des verwendeten hoch elastischen Kaltschaums ist die Matratze hoch flexibel und kann sich so jeder Lagerungsposition anpassen.
- ◇ bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist.
- ◇ bei denen eine Scherkraftminimierung, wie sie z.B. durch Pflegemaßnahmen auftreten, erforderlich ist. Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze **von geschultem Fachpersonal vor Ort eingeschätzt werden**.

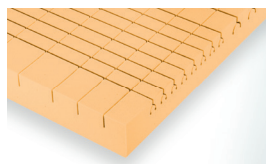

12 cm – einschichtig

Anwendungseinschränkungen

- ◇ Die Matratze darf nicht bei bestehender Schaumstoffallergie eingesetzt werden.
- ◇ Beim Einsatz der Matratze ist die **Gewichtsvorgabe unbedingt zu beachten**:

Höhe/Ausführung	12 cm
Einsatzbereich	bis 120 kg
Empfohlen	bis 90 kg ¹⁾
Mikroklima	Klasse ²⁾ H (51 %)
Druckentlastung	bei 80 kg Klasse H (23 %)

¹⁾ Bei Patienten die aufgrund Ihrer Erkrankung häufig im Bett sitzen (hochgestelltes Kopfteil) sollte ein Patientengewicht von ca. 80 kg nicht überschritten werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Matratze "durchgessen" wird.

²⁾ Informationen zur Klassifizierung siehe www.kubivent.com.

Verwendung der Matratze in Betten mit verstellbarer Liegefläche

Höhe/Ausführung	12 cm
Verwendbarkeit	ja ³⁾

³⁾ Bei Patienten die aufgrund Ihrer Erkrankung/Behinderung häufig mit hochgestelltem Kopfteil im Bett sitzen muss darauf geachtet werden, dass die Matratze nicht durchgessen wird. Sollte dies der Fall sein – vor allem bei Patienten mit höherem Körpergewicht – sollte im Zweifelsfall eine härtere Matratze eingesetzt werden.

Einsatz der Matratze in Betten mit Seitengittern

Aufgrund der Matratzenhöhe von 12 cm ist beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter grundsätzlich darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist.

Empfehlenswert ist auch der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

- ◇ **Allergien**
Die Matratze darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.
- ◇ **Inkontinenz**
Bei vorliegender Inkontinenz liegt ein passender Inkontinenzschutzbezug im Lieferumfang dabei und sollte bei Bedarf verwendet werden. Der wasserdichte Schutzbezug ist mit einem zweiseitigen Reißverschluss ausgestattet und kann bequem überzogen werden.
- ◇ **Gewichtsbeschränkungen**
Bitte beachten Sie unbedingt die angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Matratze. Nur so kann vermieden werden, dass bei zu schweren Patienten die Matratze durchgelegen wird oder bei zu leichten Patienten die Matratze zu hart ist.

Sachgerechte Anwendung und Wirkungsweise

- ◇ Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch sonstigen Betten geeignet. Die Matratze wird so auf die Unterlage gelegt, dass der Hinweisaufkleber 'Oberseite der Matratze' nach oben weist. Die Würfeinschnitte im Matratzenkern sind somit nach oben gerichtet.
- ◇ Durch den verwendeten HR-Schaumstoff (HR = High Resilient = hochelastisch) wird eine hohe Punkt- elastizität gewährleistet, die die Grundlage für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition bildet. Der Auflagedruck, Hauptursache für die Entstehung von Decubiti, wird so auf ein Minimum reduziert.
- ◇ Unterstützt wird dies durch die ergonomisch angeordneten Würfeinschnitte, durch die auch potenzielle Scherkräfte beim Umlagern minimiert werden.
- ◇ Neben seiner hohen Elastizität zeichnet sich der verwendete HR-Schaumstoff auch durch eine sehr offene porige Struktur aus. In Kombination mit den würfelförmigen Einschnitten in der Liegefläche wird so eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Ein Wärme- und Feuchtigkeitsstau kann so vermieden werden.

Technische Daten

12 cm		
Matratze inkl. Baumwollbezug hellblau und geschlossenem Inko-Bezug mintgrün		
HM-Nr. 11.29.05.1035		
Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
CFML102	190 x 90 cm	8,36 kg
CFML1017	190 x 100 cm	9,29 kg
CFML103	200 x 90 cm	8,80 kg
CFML104	200 x 100 cm	9,78 kg
CFML105	200 x 120 cm	11,74 kg
CFML106	200 x 140 cm	13,70 kg

Verwendete Materialien für Matratze und Bezüge

	12 cm
Matratzenkern	Kaltschaum (HR-Schaum), Raumgewicht 35 kg/m ³ , Stauchhärte 3,4 kPa
Bezug	Baumwollbezug hellblau und geschlossener Inko-Bezug mintgrün