

**Seeger** 



KOMFORT

**ELLENBOGENBANDAGE**



**Seeger** 

Das Gesundheitshaus

[www.seeger-gesundheit.de](http://www.seeger-gesundheit.de)

# KOMFORT

## Ellenbogenbandage

**REF** 141 720 PS

### Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für das Vertrauen in dieses Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

### Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Ellenbogenbandage zur Weichteilkompression mit druckverstärkenden Pelotten aus flexiblem Material im Ellenbogenbereich.

### Indikationen

chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis, Tendomyopathie

### Kontraindikationen

periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie

## **Anwendungsrisiken/Wichtige Hinweise**

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- bei längeren Ruhephasen ablegen z. B. beim Schlafen
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Bandage: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

## **Anziehenanleitung**

Fassen Sie zuerst den oberen Rand der Bandage, dann die Bandage im Bereich der Pelotteneinschweißung fassen und über den Ellenbogen ziehen. Darauf achten, dass der äußere Knochenvorsprung (Epicondylus) in der Aussparung der Pelotte positioniert wird, genauso auch der innere Knochenvorsprung.

Zur Verstärkung der entlastenden Kompressions-Wirkung durch die Pelotten das beiliegende Stabilo®-Band mittels Klettverschluss an der dafür vorgesehenen Klettfläche im Bereich der Ellenbeuge fest kletten, dann das Stabilo®-Band moderat festziehen und das Gurtende mit Klettverschluss ohne Spannung wieder ankleben.

## Ablegen

Zum Ablegen der Bandage bitte erst das Stabilo®-Band entfernen, dann unteren Rand fassen und nach unten über den Unterarm und Hand ziehen.

## Materialzusammensetzung






Polyamid (PA), Elastodien/Latex (LA), Elasthan (EL)

Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenahten Textiletikett.



Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

## Reinigungshinweise

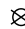 Schonwaschgang 30 °C  Nicht bleichen  Nicht im Wäschetrockner trocknen  Nicht bügeln  Nicht chemisch reinigen  
Klettverschlüsse schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Keinen Weichspüler verwenden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

## Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt wer-

den bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

### **Nutzungsdauer/Lebensdauer des Produkts**

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt.

### **Meldepflicht**

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder dem Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Die Kontaktdaten des Herstellers entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: [www.bort.com/md-eu-kontakt](http://www.bort.com/md-eu-kontakt).


### **Entsorgung**

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

### **Konformitätserklärung**

Der Hersteller bestätigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht.

## Messpunkt

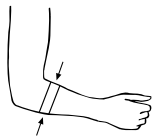

Umfang Unterarm  
(5 cm unter  
Ellenbogengelenk)

## Größen

Größen	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)
xx-small	20 – 22 cm
x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm

rechts und links gleich

**MD** Medizinprodukt |  Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

Stand: 09.2023

## Vertrieb durch

Seeger Gesundheitshaus GmbH & Co. KG  
Döbelner Straße 1 – 5  
12627 Berlin

## Hersteller

BORT GmbH  
Am Schweizerbach 1  
D-71384 Weinstadt

[www.seeger-gesundheit.de](http://www.seeger-gesundheit.de)



PDF: [ga.seeger-gesundheit.de](http://ga.seeger-gesundheit.de)

